

Pライト

医療機器許可番号：17BZ5002



特徴

- 創を損傷しない素材を使用しておりポケット内の組織を傷つけません
- 皮膚表面からポケット部の位置確認ができます
- 褥瘡のポケット部の大きさを簡単に・正確に計測できます
- フレキシブルなのでどんな体位でも計測可能です


TEAHIRA

越屋メディカルケア株式会社


Pライト

東京大学大学院医学系研究科
健康科学 看護学専攻 老年看護学／創傷看護学分野
真田研究室仕様


使用方法

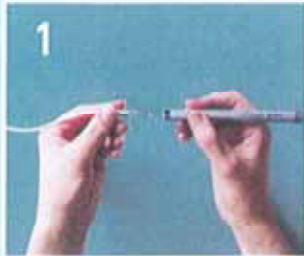


①接続する

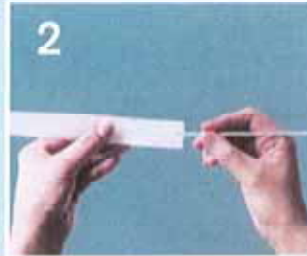

②ディスクカバーを取り付ける

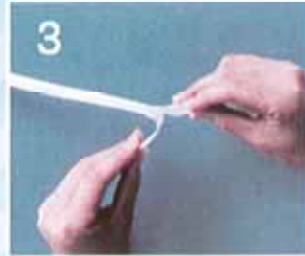

③裏紙(白)を剥がす

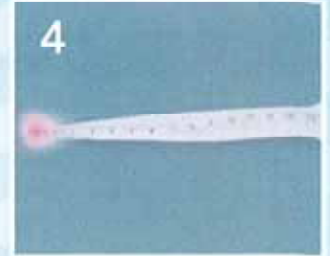

④ライトを付け創傷ポケットに挿入する

最深部に到達した時点での皮膚表面のライト、目盛りを確認し、ポケットの大きさを計測、記録する

Pライト内容・価格



品番：PR-000
品名：Pライトセット (PR-001～3)
単位：1組
税込価格：12,495円



品番：PR-001
品名：スケールチューブ+電池ケース
単位：1組
税込価格：8,925円



品番：PR-002
品名：ディスクカバー
単位：100枚／1箱
税込価格：2,940円



品番：PR-003
品名：携帯用ホルダー
単位：1個
税込価格：630円



品番：PR-004
品名：スケールチューブ
単位：1本
税込価格：5,250円



品番：PR-005
品名：電池ケース
単位：1本
税込価格：5,250円

使用上の注意

- ディスクカバーは使い捨てですので再使用はできません
- 破袋したものは使用できません
- 生理食塩水で患部測定部を洗浄後、使用してください
- 使用中は製品を注意深く観察し、破損、変形等があれば直ちに使用を中止してください
- ライトが暗くなったら電池(単4×2本)を交換してください

■総販売元 株式会社 ケープ

本社／〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所／〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾2-17-20
TEL:092-521-0421 FAX:092-521-0399

■発売元 越屋メディカルケア株式会社

〒920-0935 石川県金沢市石引4-4-10
TEL:076-223-7250

■製造販売元 株式会社 越屋

〒920-0935 石川県金沢市石引3-5-16
TEL:076-223-7353

お見積もり、お問い合わせは
株式会社 ケープへ